

Whitening Magic

— ホワイトニング・マジック —



歯を白くするには？

歯の表面には、お茶・コーヒー・ワイン・食品添加物や喫煙など生活習慣によるさまざまなステインやプラークが付着して、歯が汚く見える原因となります。

ドラッグストアなどで販売されている「歯が白くなる歯磨き剤」はそれらのステインを取り除くためのクリーナーで、例えば普段使うティーカップの着色を削り落すことと同じ目的で使用されます。

Question:

ホワイトニングとは「歯の表面に付着したステインを落とすこと」でしょうか？



A: 歯医者さんや歯科衛生士さんに歯の表面をクリーニングしてもらうことです。

B: 歯の表面だけでなく、歯そのものの色調を改善する治療法のひとつです。

Final Answer:

「B」が正解です。

ホワイトニングは「歯自体を明るい白さに改善する」という意味で、近年まで不可能と認識されていた治療法です。ホワイトニングは「黄ばんだシャツを真っ白にするような」効果があり、歯に染み込んだ色素を取り除いてキレイにすることができます。



Opalescence
tooth whitening systems



私もホワイトニングしたい

ホワイトニングでできることは、「生まれつき黄ばみが強い」、「高齢化による変色」、「抗生物質の副作用で起きた変色」、といった類の歯質内部の色素を分解し、さらに歯の表面に付着した頑固なステインまでもマイルドに分解します。

歯を内部から外側まで「丸洗い」することで、「歯の美しい白さをよみがえらせる」ことも「今まで以上の白さを創造する」ことも可能になりました。


ホワイトニング・マジック

不思議・不思議、ホワイトニングは魔法のように歯の色調を改善しますが、口元が明るさを得ることで「ナチュラルで爽やかな笑顔」が生まれるだけでなく、ライフスタイルまで好転させる可能性を秘めています。

ホワイトニング体験者だけが実感できる想像を超えたホワイトニング・マジック、試してみたいはいかがですか？

安全性

オパールエッセンス 10% ジェルは ADA(米国歯科医師会)と日本の厚生労働省から承認を受け、安全性が確立された材料です。

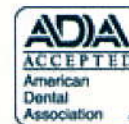

使用前



使用后

Opalescence
tooth whitening systems



The power of a professional white

ULTRADENT
JAPAN 株式会社

#68200-JP.1 081806



Whiten

アメリカ市場 NO.1 ブランド 「オパールエッセンス 10%の特徴」

ホワイトニングは歯のマニキュアや歯を削ることと違って歯を傷めません。歯の中の色素を分解し、白さを保つものです。

オパールエッセンス 10%は ADA (アメリカ歯科医師会) によりその安全性を証明され、日本国内で厚生労働省の承認を得て販売されている唯一の商品です。安心してお使い頂けます。



患者様のニーズに合わせて、低濃度のジェルをご家庭で、ご自身の空き時間に行えるのがホームホワイトニングです。



使用前



使用后
(目黒区開業 近藤隆一先生のご厚意に写真)


「ホームホワイトニングの流れ」

歯科医院にて

- 1、 歯科医師より使用方法、注意事項の説明を聞きます。口腔全体の検査と適応症の診査をします。



- 2、 歯の色の診査を行います。

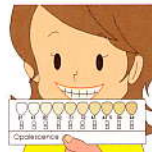

- 3、 歯科医師又は歯科衛生士が、前処置として歯面清掃を行います。



- 4、 歯列に適合したカスタムトレーを製作するために、歯形を取ります。
- 5、 完成したカスタムトレーを受け取り、装着具合を確認します。
- 6、 歯科医師よりカスタムトレーへのジェルの付け方など、使用手順の説明を受けます。

ご家庭にて

- 1、 カスタムトレーを使用前に洗います。



- 2、 シリンジの先端のキャップを外し、カスタムトレーにジェルを注入します。



- 3、 カスタムトレーにジェルが適量付いたのを確認後、歯にセットします。はみ出たジェルは歯ブラシか指で取り除いてください。



- 4、 終了後はカスタムトレーを外し、口を水で十分にすすいでください。カスタムトレーは、歯ブラシを使って水洗いし、水分を拭き取ってからトレーケースに保管します。